

ООО «Лед Фаворит»



ПАСПОРТ

на облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD

1. Наименование и область применения

1.1. Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led Favourite JX-XD сертифицированы и предназначены для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения длиной волны 185 нм или 254 нм в бактерицидных облучателях.

Область применения:

- в целях обеззараживания воды;
- в целях стерилизации воздуха;
- в целях предохранения от микробного загрязнения;

1.2. Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led Favourite JX-XD питаются от сети переменного тока 220V AC / 50 Гц . Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led Favourite JX-XD оборудованы стартерным пускорегулирующим аппаратом по ГОСТ 16809-88 и стартером по ГОСТ ИЕС 60155-2012.

1.3. При нахождении в одном помещении с работающим облучателем бактерицидным открытого типа настенным Led Favourite JX-XD необходимо защищать глаза защитными очками по ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. Облучение облучателем бактерицидным открытого типа настенным Led Favourite JX-XD при отсутствии защитных средств может вызвать ожог кожи любого участка тела, лица, рук; а также слизистых оболочек глаз. Замену ламп, чистку облучателей от пыли необходимо производить при отключении их от питающей сети. В случае, если лампа была разбита, требуется аккуратно собрать и удалить осколки лампы в контейнер; а место, где разбилась лампа, обработать 1% раствором перманганата калия, после чего тщательно проветрить помещение. Контейнер с

разбитой лампой необходимо передать на утилизацию специализированным организациям.

Технические характеристики

2.1. Основные характеристики

Технические характеристики	Показатели
Рабочее напряжение	220 V AC
Материал корпуса	Сталь
Стартерный пускорегулирующий аппарат в комплекте	да
Бактерицидная лампа в комплекте	нет
Форма лампы	трубка T8
Колба	Увиолевое стекло / кварцевое стекло
Срок эксплуатации	9000ч
Температура эксплуатации	-20 +50
Относительная влажность воздуха	до 95%
Угол светового пучка (градусы)	180
Степень защиты по ГОСТ 14254	44

Модели облучателей бактерицидных открытого типа настенных Led Favourite JX-XD

Модель	Мощность Вт	Габариты, мм	Масса, г
Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD-462mm-15w	15 Вт	462*32*50	400
Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD-620mm-20w	20 Вт	620*32*50	540
Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD-925mm-30w	30 Вт	925*32*50	750
Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD-1230mm-40w	40 Вт	1230*32*50	950

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию облучателей бактерицидных открытого типа настенных, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.



3. Комплект поставки

Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD — 1 шт.,

Необходимые комплектующие для крепления облучателя и подключения к сети переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц.

Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,

Индивидуальная упаковка из картона.

4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически воспрещается:

- ронять, разбивать лампу, хранить вне упаковки;
- разбирать лампу;
- производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании;
- эксплуатировать облучатели, имеющие механические повреждения;
- прикасаться к цоколю при установке лампы в патрон;
- при нахождении в одном помещении с работающим облучателем бактерицидного открытого типа настенным Led Favourite JX-XD необходимо защищать глаза защитными очками по ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. Облучение облучателем бактерицидного открытого типа настенным Led Favourite JX-XD при отсутствии защитных средств может вызвать ожог кожи любого участка тела, лица, рук, а также слизистых оболочек глаз;
- замену ламп, чистку облучателя от пыли необходимо производить при отключении их от питающей сети;
- в случае, если лампа была разбита, требуется аккуратно собрать и удалить осколки лампы в контейнер, а место, где разбилась лампа, обработать 1% раствором перманганата калия, после чего тщательно проветрить помещение. Контейнер с разбитой лампой необходимо передать на утилизацию специализированным организациям;

5. Инструкция по монтажу

5.1. Монтаж и подключение должны осуществляться только квалифицированным электриком.

5.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства.

5.3. Установите облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD на предполагаемое место монтажа.

5.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.


5.5. Присоединение облучателя к поврежденной проводке запрещено!

5.6. Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления.

5.7. Установите бактерицидную лампу T8 UV 220v в светильник. Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD готов к эксплуатации.

5.8. Эксплуатация облучателя бактерицидного открытого типа настенного Led Favourite JX-XD проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Схема подключения облучателя бактерицидного открытого типа настенного Led Favourite JX-XD

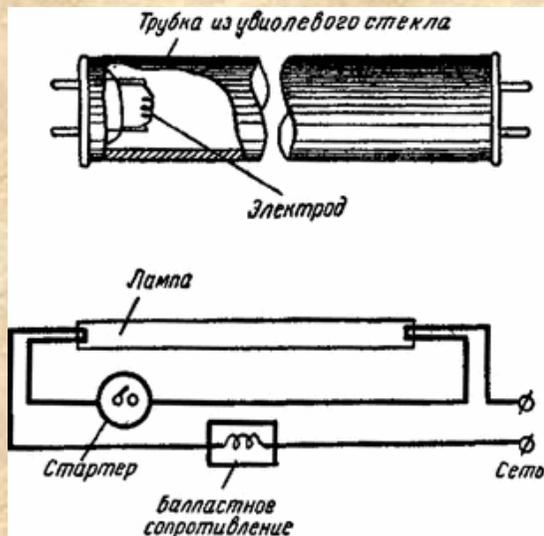

ВНИМАНИЕ!!

Неправильное подключение может привести к выходу облучателя из строя.

6. Сведения об утилизации

Бактерицидные лампы T8 UV 220v вышедшие из строя должны быть переданы потребителями на пункты утилизации люминесцентных ртутных ламп.

7. Правила хранения и транспортировки

7.1. Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD поставляется упакованной в коробку из картона.

7.2. Условия транспортировки облучателя в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать

группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7.3. Условия хранения облучателя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения ламп – 1 год, корпуса облучателя - 3 года.

7.4. Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD содержит хрупкие части. При погрузке, выгрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

7.5. Эксплуатация облучателя бактерицидного открытого типа настенного Led Favourite JX-XD производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. Сертификация

Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led Favourite JX-XD сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60598 -1-2013	«Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»

ГОСТ IEC 60598 – 2-1 -2011	«Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»
Раздел 5 ГОСТ IEC 61547 - 2013	«Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»
Разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2.- 2013	«Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»
ГОСТ 12.2.007.13 - 2000	«Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности»
Раздел 5 ГОСТ IEC 61547 30804.3.2 - 2013	«Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего

	назначения. Требования и методы испытаний»
ГОСТ Р 8.760-2011	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение энергетических и эффективных характеристик ультрафиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика измерений
ГОСТ IEC 61195-2012	Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности
ГОСТ Р 15.013-94	Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ Р 50267.0-92	Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности

9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует нормальную работу облучателя бактерицидного открытого типа настенного Led Favourite JX-XD в течение 3-х лет со дня отгрузки.

9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя облучателя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи ламп или к предприятию-изготовителю.

9.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина — гарантийный срок исчисляется со дня изготовления облучателя.

9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки, качестве и количестве принимаемого товара при его получении. Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить работоспособность. После подписания документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.

9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не принимаются.

10. Свидетельство о приёме

Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led Favourite JX-XD сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Поставщик : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Лед Фаворит", 109052, г. Москва, проезд Автомобильный, д. 10, стр. 5, подв. Пом. I К 17
ОГРН 1187746893663 ИНН 7722468337 КПП 772201001

Изготовитель: Фуджиан Джексин Электроник анд Технолоджи ЛТД, 26/Ф Тауэр 1 Тайм Скуэр, 1 Матэсон стрит, Каузевай бэй, Гонг Конг



Гарантийный талон

Артикул _____

Модель _____

Дата выпуска _____

Номер партии _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____